



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

DMQ

Limpiador Desinfectante de superficies fijas y artículos no críticos para Uso Hospitalario

Propiedades:

DMQ es un limpiador desinfectante y sanitizante a base de **Amonio Cuaternario de Amonio de 5ª generación y Biguanida Polimérica**, desarrollado para la limpieza y desinfección de superficies fijas, tales como suelo, pared, techo, puertas, bancos, escaleras, ventanas, vidrios, luminarias, los equipos, muebles, vajillas sanitarias, camillas, incubadoras, etc., y artículos no críticos, tales como, termómetro axilar, estetoscopio, soporte de suero, aparatos de presión, comadres, loros, cuencos, cuba riñón, sillas de baño, entre otros, en áreas críticas de hospitales, centros quirúrgicos, centro obstétrico, UTI, UTI Neonatal, unidad de diálisis, sector de hemodinámica, unidad de trasplante, unidad de quemados, unidad de aislamiento, área sucia del lavadero, etc. También puede ser empleado en áreas semi críticas de enfermería, baños, central de clasificación, etc., y en y en áreas no críticas, tales como, almacenes, vestuarios y áreas administrativa. DMQ es indicado también para laboratorios de análisis clínicos, clínicas médicas, odontológicas, de estética y veterinaria.

DMQ posee laudos que comprueban su acción de desinfección y sanitización contra los microorganismos: *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter hirae* y *Candida albicans*.

Instrucciones de uso:

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer completamente el rótulo presente en el envase, así como las Hojas de Seguridad.

No mezcle este ni ningún producto químico.

Limpeza y desinfección de superficies fijas

Utilizar DMQ diluido en agua en una proporción de hasta 1:50 (1 parte de producto para 50 partes de agua) y según el nivel de carga orgánica a remover de las superficies. Aplicar la solución del producto con paño descartable, paño de microfibra, esponja o mopa según corresponda. Dejar actuar por 5 minutos. Enjuagar con agua potable.

Limpeza y desinfección de artículos no críticos

Lavar, enjuagar y secar los artículos. Utilizar DMQ diluido en agua en una proporción de hasta 1:50 (1 parte de producto para 50 partes de agua). Sumergir los artículos en la solución dejando actuar 5 minutos. Enjuagar y secar los artículos. Utilizarlos a la mayor brevedad posible.



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Sanitización

Para la disminución de la carga microbiana de aquellas superficies que no requieran desinfección tales como pisos, puertas, asientos, escaleras, ventanas, luminarias, muebles, entre otros; diluir DMQ en agua en una proporción de hasta 1:100 (1 parte de producto para 100 partes de agua). Dejar en contacto con la superficie por 10 minutos.

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por más información, consulte a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a través de su distribuidor autorizado o visitando la página web www.spartanlatam.com.

Especificaciones técnicas:

Apariencia:	Líquido transparente	Aroma:	Característico
Color:	Amarillo	pH:	6,5 – 8,5
Densidad (a 24°C):	0,980 – 1,010 gr/cm ³ .	Solubilidad:	Completa en agua
Viscosidad (a 24°C):	No especificada	Contenido de activos:	3,0 – 5,0%
Activos desinfectantes:	Cloruro de Alquil Benzil Amonio + Cloruro de Octil Decil Dimetil Amonio + Cloruro de Didecil Dimetil Amonio + Cloruro de Dioctil Dimetil Amonio: 1,92%. Cloridrato De Polihexametileno Biguanida 0,2 %		

Precauciones:

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

No mezclar con otros productos. Mezclar solo con agua. No aplicar sobre superficies calientes. Emplear guantes durante la manipulación y aplicación del producto. En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-333-0160 o al médico, llevando el envase o rótulo del producto. No trasvasar el producto a envases de alimentos o bebidas. No reutilice el envase vacío para otros fines.

Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. Evitar que se congele.



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Presentaciones:

4x5 litros

Embalaje: De alta calidad que evita derrames.

Garantía: La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme.



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Av. del Libertador 101, piso 10 - Torre Al Río
B1638BEA, Vicente López, Bs. As.

Tel: 0810-345-3585

e-mail: contacto@spartanchemical.com.ar

www.spartanlatam.com

Cambiando la Cultura.
Simplificando la Limpieza.

